

# Informações técnicas do produto – VENT110N

| Imagem do produto                                                                 | Código do produto                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | VENT110N                                                                                              |
|                                                                                   | Descritivo                                                                                            |
|                                                                                   | <p>TRAQUEIA (TUBO CORRUGADO) SILICONE<br/> AUTOCLAVÁVEL - 12 x 0450 mm (ANVISA:<br/> 80677040002)</p> |

| Descrição e indicações do produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>As Traqueias (Tubo Corrugado) são construídas em Silicone, disponíveis em vários comprimentos, tem a finalidade de se adequar a diversos procedimentos médico hospitalares. As Traqueias (Tubo Corrugado) são indicadas para auxiliar no transporte de fluxo de gases e vapores medicinais para uso em equipamentos médico-hospitalares e/ou pacientes. As Traqueias (Tubo Corrugado) podem ser utilizadas em procedimentos médico-hospitalares, ambulâncias, clubes, Bombeiros, terapia intensiva, recuperação e em outras necessidades.</p> |

| Especificações técnicas  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome técnico             | Tubo traqueal                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nome comercial           | Traqueia (Tubo Corrugado) Silicone AUTOCLAVÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Registro na ANVISA       | 80677040002 (Cadastro por família - componente)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Classificação de risco   | II – Médio risco                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Esterilização compatível | <div>  Compátível com esterilização em Gás Óxido de Etileno </div> <div>  Autoclavável até 134°C por um período de 4 minutos </div> |
| Construção do produto    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Material                 | Silicone                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Coloração do bocal       | Verde                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Padrão de conexão        | NBR 10335 (Eb 1736) – Bocal Conector para Tubo Traqueal                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Diâmetro Interno         | 9,7mm ± 0,50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Comprimento              | 450mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Estrutura externa        | Tubo corrugado espiralado                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Estrutura interna        | Tubo liso                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dureza do tubo           | 65 Shore A                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Procedimento simplificado de operação

Para usar as Traqueias (Tubo Corrugado) encaixe uma de suas extremidades forçando-a no sentido do conector e/ou saída desejada.

**Nota:**

Sempre realize este procedimento segurando no bocal do tubo, puxar o tubo bruscamente pelo corpo poderá ocasionar em dano irreversível à estrutura do produto e caracteriza mal uso do mesmo.

#### Precauções

- Não utilize a Traqueia (Tubo Corrugado) em atmosferas tóxicas;
- Realize as conexões entre o equipamento médico-hospitalar, paciente e Traqueia (Tubo Corrugado) firmemente;
- Caso o paciente esteja entubado, realize as conexões com firmeza.

#### Cuidados para armazenamento e transporte

- Deve ser armazenado em local sem umidade e insolação, individualmente para que não sofra deformação e nem quebra dos drenos coletores.
  - Transportar o produto ao abrigo da luz solar, seco e em temperatura ambiente.
- Transportar o produto cuidadosamente para evitar danos.
- Para transporte, são admitidas variações de temperatura entre -5°C à 45°C e com umidade relativa inferior a 95%.

## Fabricante / Distribuidor

---

### **Ventcare Indústria e Comércio LTDA**

**CNPJ:** 11.011.753/0001-19 | **AFE ANVISA:** 8.06770-4

Alameda da Águia, 71, Centro, Buri-SP, Brasil | CEP: 18.290-000

E-mail: [ventcare@ventcare.com.br](mailto:ventcare@ventcare.com.br) | Telefone: +55 (15) 3546-1373

WhatsApp: +55 (15) 9 9770-2559 | Instagram: @ventcare\_br

*Todos os direitos reservados © 2009-2022*