

# Informações técnicas do produto – VENT163P3000MM

| Imagem do produto                                                                 | Código do produto                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | VENT163P3000MM                                                                                            |
|                                                                                   | Descritivo                                                                                                |
|                                                                                   | <p>Tubo de Amostra de Gases 300 cm LUER MACHO/MACHO (ANVISA 80677049004)</p> <p>(ANVISA: 80677040004)</p> |

| Descrição e indicações do produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Os produtos tubo extensores para amostra de gases são fabricados com materiais atóxicos. São compostos por conexões em padrão “LUER LOCK”, conforme a norma I.S.O 80369, sendo compatível com os padrões internacionais de conexão, garantindo assim vedação e segurança durante o procedimento médico.</p> <p>Utilizado para coleta de gases dos circuitos de anestesia ou ventilação, transportando a coleta (gases) até o equipamento de monitoramento, o qual realizará a análise e indicar a correção dos parâmetros de procedimento médico.</p> |

| Especificações técnicas  |                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome técnico             | Tubos                                                                                                                                    |
| Nome comercial           | Tubo de amostra de gases com ponteira Luer Lock                                                                                          |
| Registro na ANVISA       | 80677040004 (Cadastro por família - componente)                                                                                          |
| Classificação de risco   | II – Médio risco                                                                                                                         |
| Esterilização compatível |  Compatível com esterilização em Gás Óxido de Etileno |
| Construção do produto    |                                                                                                                                          |
| Material                 | Policloreto de Vinila (PVC)                                                                                                              |
| Material do conector     | Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS)                                                                                                   |
| Coloração do bocal       | Translúcido                                                                                                                              |
| Padrão de conexão        | ISO 80369-7 Luer Lock ( MACHO/MACHO )                                                                                                    |
| Comprimento              | 3000 mm                                                                                                                                  |
| Estrutura                | Tubo liso                                                                                                                                |
| Dureza do tubo           | 75 ± 3 Shore A                                                                                                                           |

#### Procedimento simplificado de operação

Para usar o Tubo de Amostra encaixe uma de suas extremidades no conector Luer Lock desejado.

**Nota:**

Puxar o tubo bruscamente pelo corpo poderá ocasionar em dano irreversível à estrutura do produto e caracteriza mau uso do mesmo.

#### Precauções

- Não utilize o Tubo de Amostra em atmosferas tóxicas;
- Realize as conexões entre o equipamento médico-hospitalar, paciente e o tubo de amostra firmemente;
- Caso o paciente esteja entubado, realize as conexões com firmeza.

#### Cuidados para armazenamento e transporte

- Deve ser armazenado em local sem umidade e insolação, individualmente para que não sofra deformação e nem quebra dos drenos coletores.
  - Transportar o produto ao abrigo da luz solar, seco e em temperatura ambiente.
- Transportar o produto cuidadosamente para evitar danos.
- Para transporte, são admitidas variações de temperatura entre -5°C à 45°C e com umidade relativa inferior a 95%.

## Fabricante / Distribuidor

---

### **Ventcare Indústria e Comércio LTDA**

**CNPJ:** 11.011.753/0001-19 | **AFE ANVISA:** 8.06770-4

Alameda da Águia, 71, Centro, Buri-SP, Brasil | CEP: 18.290-000

E-mail: [ventcare@ventcare.com.br](mailto:ventcare@ventcare.com.br) | Telefone: +55 (15) 3546-1373

WhatsApp: +55 (15) 9 9770-2559 | Instagram: @ventcare\_br

*Todos os direitos reservados © 2009-2022*