

Informações técnicas do produto – VENT143

Imagem do produto	Código do produto
	VENT143
	Descritivo
	<p>TRAQUEIA (TUBO CORRUGADO) PVC CRISTAL ATOXICO - 22 x 0600 mm</p> <p>(ANVISA: 80677040002)</p>

Descrição e indicações do produto
<p>As Traqueias (Tubo Corrugado) são construídas em Policloreto de Vinila (PVC) Atóxico, disponíveis em vários comprimentos, tem a finalidade de se adequar a diversos procedimentos médico hospitalares. As Traqueias (Tubo Corrugado) são indicadas para auxiliar no transporte de fluxo de gases e vapores medicinais para uso em equipamentos médico-hospitalares e/ou pacientes. As Traqueias (Tubo Corrugado) podem ser utilizadas em procedimentos médico-hospitalares, ambulâncias, clubes, Bombeiros, terapia intensiva, recuperação e em outras necessidades.</p>

Especificações técnicas	
Nome técnico	Tubo traqueal
Nome comercial	Traqueia (Tubo Corrugado) Silicone AUTOCLAVÁVEL
Registro na ANVISA	80677040002 (Cadastro por família - componente)
Classificação de risco	II – Médio risco
Esterilização compatível	<p><input type="checkbox"/> ETO Compatível com esterilização em Gás Óxido de Etileno</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Produto INCOMPATÍVEL com Autoclave</p>
Construção do produto	
Material	Policloreto de Vinila (PVC) Translúcido Atóxico
Coloração do bocal	Translúcido
Padrão de conexão	NBR 10335 (Eb 1736) – Bocal Conector para Tubo Traqueal
Diâmetro	22mm
Comprimento	600mm
Estrutura externa	Tubo corrugado espiralado
Estrutura interna	Tubo liso
Dureza do tubo	65 Shore A

Procedimento simplificado de operação

Para usar as Traqueias (Tubo Corrugado) encaixe uma de suas extremidades forçando-a no sentido do conector e/ou saída desejada.

Nota:

Sempre realize este procedimento segurando no bocal do tubo, puxar o tubo bruscamente pelo corpo poderá ocasionar em dano irreversível à estrutura do produto e caracteriza mal uso do mesmo.

Precauções

- Não utilize a Traqueia (Tubo Corrugado) em atmosferas tóxicas;
- Realize as conexões entre o equipamento médico-hospitalar, paciente e Traqueia (Tubo Corrugado) firmemente;
- Caso o paciente esteja entubado, realize as conexões com firmeza.

Cuidados para armazenamento e transporte

- Deve ser armazenado em local sem umidade e insolação, individualmente para que não sofra deformação e nem quebra dos drenos coletores.
 - Transportar o produto ao abrigo da luz solar, seco e em temperatura ambiente.
- Transportar o produto cuidadosamente para evitar danos.
- Para transporte, são admitidas variações de temperatura entre -5°C à 45°C e com umidade relativa inferior a 95%.

Fabricante / Distribuidor

Ventcare Indústria e Comércio LTDA

CNPJ: 11.011.753/0001-19 | **AFE ANVISA:** 8.06770-4

Alameda da Águia, 71, Centro, Buri-SP, Brasil | CEP: 18.290-000

E-mail: ventcare@ventcare.com.br | Telefone: +55 (15) 3546-1373

WhatsApp: +55 (15) 9 9770-2559 | Instagram: @ventcare_br

Todos os direitos reservados © 2009-2022