

Informações técnicas do produto – VENT148L

Imagem do produto	Código do produto
	VENT148L
	Descritivo
	TRAQUEIA (TUBO CORRUGADO) PVC CRISTAL ATÓXICO - 22 x 2000 mm (ANVISA: 80677040002)

Descrição e indicações do produto
As Traqueias (Tubo Corrugado) são construídas em Policloreto de Vinila (PVC) Atóxico, disponíveis em vários comprimentos, tem a finalidade de se adequar a diversos procedimentos médico hospitalares. As Traqueias (Tubo Corrugado) são indicadas para auxiliar no transporte de fluxo de gases e vapores medicinais para uso em equipamentos médico-hospitalares e/ou pacientes. As Traqueias (Tubo Corrugado) podem ser utilizadas em procedimentos médico-hospitalares, ambulâncias, clubes, Bombeiros, terapia intensiva, recuperação e em outras necessidades.

Especificações técnicas	
Nome técnico	Tubo traqueal
Nome comercial	Traqueia (Tubo Corrugado) Silicone AUTOCLAVÁVEL
Registro na ANVISA	80677040002 (Cadastro por família - componente)
Classificação de risco	II – Médio risco
Esterilização compatível	 Compatível com esterilização em Gás Óxido de Etileno  Produto INCOMPATÍVEL com Autoclave
Construção do produto	
Material	Policloreto de Vinila (PVC) Translúcido Atóxico
Coloração do bocal	Translúcido
Padrão de conexão	NBR 10335 (Eb 1736) – Bocal Conector para Tubo Traqueal
Diâmetro	22mm
Comprimento	2000mm
Estrutura externa	Tubo corrugado espiralado
Estrutura interna	Tubo liso
Dureza do tubo	65 Shore A

Procedimento simplificado de operação

Para usar as Traqueias (Tubo Corrugado) encaixe uma de suas extremidades forçando-a no sentido do conector e/ou saída desejada.

Nota:

Sempre realize este procedimento segurando no bocal do tubo, puxar o tubo bruscamente pelo corpo poderá ocasionar em dano irreversível à estrutura do produto e caracteriza mal uso do mesmo.

Precauções

- Não utilize a Traqueia (Tubo Corrugado) em atmosferas tóxicas;
- Realize as conexões entre o equipamento médico-hospitalar, paciente e Traqueia (Tubo Corrugado) firmemente;
- Caso o paciente esteja entubado, realize as conexões com firmeza.

Cuidados para armazenamento e transporte

- Deve ser armazenado em local sem umidade e insolação, individualmente para que não sofra deformação e nem quebra dos drenos coletores.
- Transportar o produto ao abrigo da luz solar, seco e em temperatura ambiente. Transportar o produto cuidadosamente para evitar danos.
- Para transporte, são admitidas variações de temperatura entre -5°C à 45°C e com umidade relativa inferior a 95%.

Fabricante / Distribuidor

Ventcare Indústria e Comércio LTDA

CNPJ: 11.011.753/0001-19 | **AFE ANVISA:** 8.06770-4

Alameda da Águia, 71, Centro, Buri-SP, Brasil | CEP: 18.290-000

E-mail: ventcare@ventcare.com.br | Telefone: +55 (15) 3546-1373

WhatsApp: +55 (15) 9 9770-2559 | Instagram: @ventcare_br

Todos os direitos reservados © 2009-2022