

Informações técnicas do produto – VENT402

Imagem do produto	Código do produto
	VENT402
	Descritivo
	<p>FILTRO EVERFLO PARA CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO</p> <p>(ANVISA: 80677040011)</p>

Descrição e indicações do produto
<p>Os Filtros têm como função interceptar poeiras e partículas do ar, de tal modo que o ar respirado através da Máscara seja mais puro que o ar ambiente.</p> <p>Outra finalidade do Filtro é reduzir o ruído produzido pelo equipamento médico durante emissão da pressão positiva contínua. O Filtro Pólen/Poeira VENTCARE é utilizado com os equipamentos médicos com Sistema CPAP/BIPAP.</p>

Especificações técnicas	
Nome técnico	Filtro
Nome comercial	Filtro de Barreira (Pólen/Poeira)
Registro na ANVISA	80677040011 (Cadastro por família - componente)
Classificação de risco	II – Médio risco
Esterilização compatível	Compatível com esterilização em Gás Óxido de Etileno
Construção do produto	
Material	Poliuretano e Poliester
Dimensões do produto	Dimensões Padrão Philips Everflo

Procedimento simplificado de operação

Para o correto funcionamento de um equipamento médico específico para tratamento da Apneia Obstrutiva do Sono, é necessário utilizar-se de um filtro de entrada e que seja corretamente instalado e que não esteja danificado. Para tanto a VENTCARE Indústria e Comércio Ltda., desenvolveu uma família de filtros pólen/ poeira para equipar os diversos modelos de gerador de fluxo.

A respectiva instrução de uso deve ser utilizada quando ocorrer uma das seguintes situações:

Substituição do Filtro Pólen/Poeira VENTCARE foi desenvolvido para manter a troca mensal, ou antes, caso apresente danos. Proceder à troca do filtro da seguinte forma:

a) Remover o filtro a ser substituído do alojamento de filtro localizado no painel traseiro do respectivo produto médico.

b) Descartar o filtro utilizado.

c) Inserir o Filtro Pólen/Poeira VENTCARE no alojamento de filtro localizado no painel traseiro do respectivo produto médico.

Nota:

Recomenda-se consultar o manual do usuário ou instrução de uso do respectivo aparelho gerador de fluxo ao qual é aplicado o Filtro Pólen/Poeira VENTCARE a ser utilizado.

Precauções

A substituição mensal do filtro de ar faz parte da manutenção preventiva para evitar que a sujeira no filtro impeça o funcionamento do sistema e que cause danos no aparelho

Cuidado:

Não reinstale um filtro contra pólen molhado no equipamento médico. Quando isso ocorrer pode haver danos irreparáveis ao seu gerador de fluxo.

Atenção:

Depois de encaixado o FILTRO ao aparelho, recomendamos fazer o teste para verificar se não existem vazamentos externos ao sistema. Caso se verifique a existência, desencaixe e encaixe o FILTRO novamente.

•A não observância destas precauções será considerado mal uso do produto;

•A manipulação deverá ser feita apenas por profissionais especializados na área médico-hospitalar;

•O uso seguro e eficaz deste produto depende do correto cumprimento das instruções de uso e do conhecimento do profissional da saúde.

O DESCARTE DESTES MATERIAIS DEVE SER FEITO APÓS O USO DE ACORDO COM OS REGULAMENTOS NACIONAIS DE DESCARTE EM LOCAL APROPRIADO PARA MATERIAIS HOSPITALARES.

Cuidados para armazenamento e transporte

- Deve ser armazenado em local sem umidade e insolação, individualmente para que não sofra deformação e nem quebra dos drenos coletores.
- Transportar o produto ao abrigo da luz solar, seco e em temperatura ambiente. Transportar o produto cuidadosamente para evitar danos.
- Para transporte, são admitidas variações de temperatura entre -5°C à 45°C e com umidade relativa inferior a 95%.

Fabricante / Distribuidor

Ventcare Indústria e Comércio LTDA

CNPJ: 11.011.753/0001-19 | **AFE ANVISA:** 8.06770-4

Alameda da Águia, 71, Centro, Buri-SP, Brasil | CEP: 18.290-000

E-mail: ventcare@ventcare.com.br | Telefone: +55 (15) 3546-1373

WhatsApp: +55 (15) 9 9770-2559 | Instagram: [@ventcare_br](https://www.instagram.com/ventcare_br)

Todos os direitos reservados © 2009-2022